




1. Cliccare su icona custo diagnostic

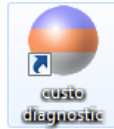


2. Nel menù nella parte superiore dello schermo cliccare su “PAZIENTE”

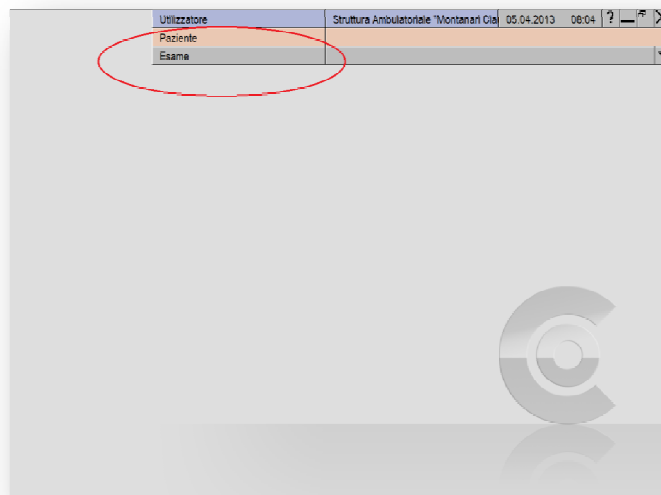

3. Si aprirà un elenco di pulsanti sul lato sinistro della videata; da qui selezionare “CERCA PAZIENTE”

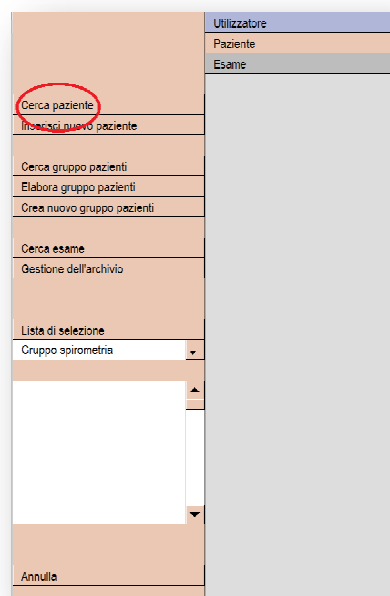


4. Quando si caricherà la maschera di ricerca immettere cognome e nome negli appositi campi (PUNTO 1) per iniziare la ricerca. Nella parte inferiore comparirà una lista di nomi (PUNTO 2) , da questa selezionare il paziente desiderato con doppio clic o cliccando sul tasto “SELEZIONA PAZIENTE” (PUNTO 3).

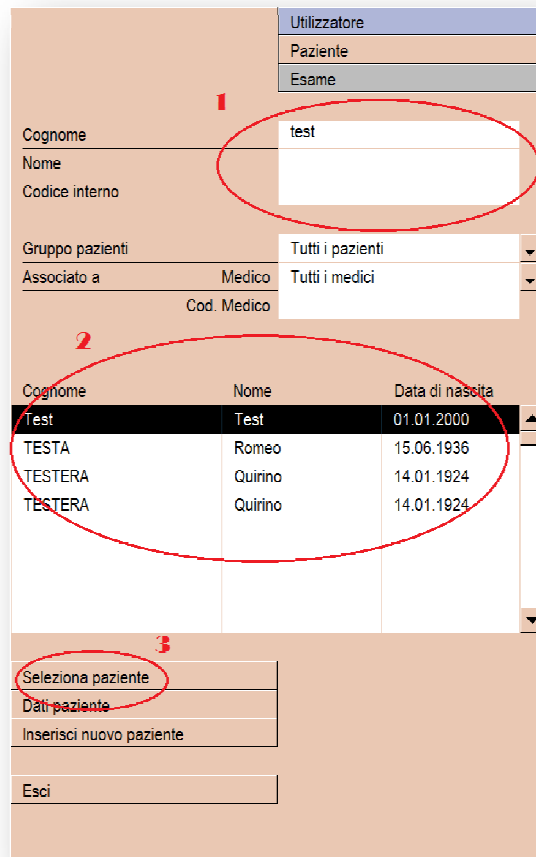


| | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| Utilizzatore | | |
| Paziente | | |
| Esame | | |
| Cognome | test | |
| Nome | | |
| Codice interno | | |
| Gruppo pazienti | Tutti i pazienti | |
| Associato a | Medico | Tutti i medici |
| Cod. Medico | | |
| Cognome | Nome | Data di nascita |
| Test | Test | 01.01.2000 |
| TESTA | Romeo | 15.06.1936 |
| TESTERA | Quirino | 14.01.1924 |
| TESTERA | Quirino | 14.01.1924 |
| Seleziona paziente | | |
| Dati paziente | | |
| Inserisci nuovo paziente | | |
| Esci | | |

5. Il nome del paziente apparirà nel menù superiore.

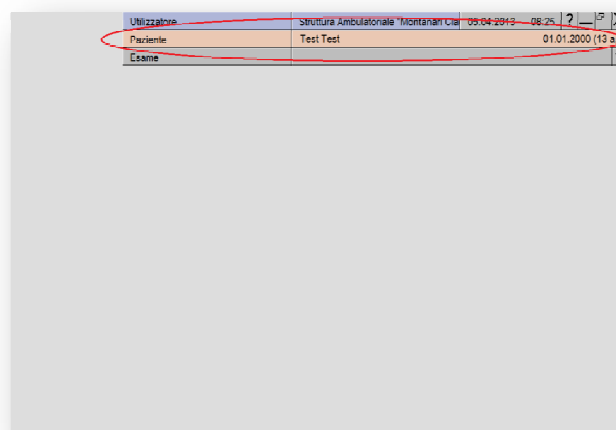


6. Nel caso che il paziente non sia presente cliccare su “INSERISCI NUOVO PAZIENTE”

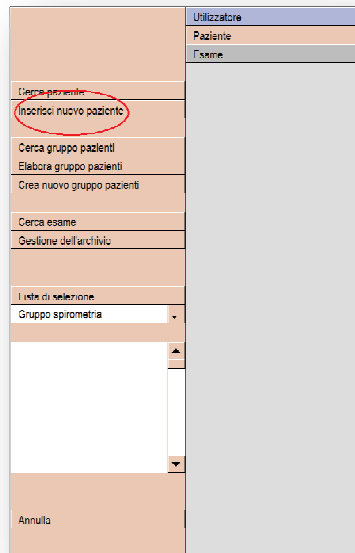


The screenshot shows a software menu with the following items: Utilizzatore, Paziente, Esame, Cerca paziente, **Inserisci nuovo paziente** (circled in red), Cerca gruppo pazienti, Elabora gruppo pazienti, Crea nuovo gruppo pazienti, Cerca esame, Gestione dell'archivio, Lista di selezione, Gruppo spirometria, and Annula.

7. si aprirà la maschera anagrafica da compilare con i campi obbligatori che sono nome, cognome, data di nascita (PUNTO 1). Nel caso ci sia una terapia da inserire compilare anche il campo “NOTE” (PUNTO 2) quindi cliccare su pulsante “SALVA” (PUNTO 3).

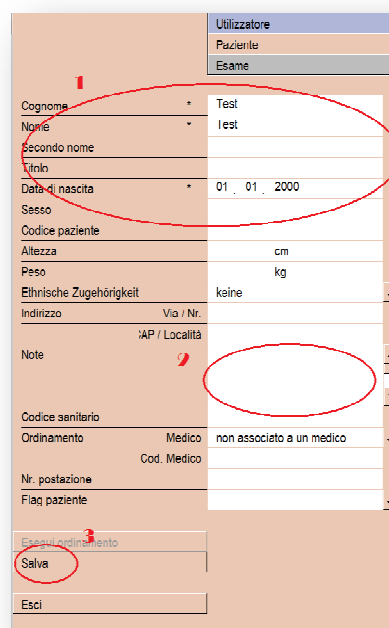


The screenshot shows a patient registration form with the following fields: Cognome (Test), Nome (Test), Secondo nome, Titolo, Data di nascita (01/01/2000), Sesso, Codice paziente, Altezza (cm), Peso (kg), Etnische Zugehörigkeit (keine), Indirizzo (Via / Nr.), Note, Codice sanitario, Ordinamento (Medico, non associato a un medico), Nr. postazione, and Flag paziente. The 'Salva' button is circled in red.

8. I dati del paziente si visualizzeranno nel menù superiore (PUNTO 1) e da qui cliccare su “ESAME” (PUNTO 2).

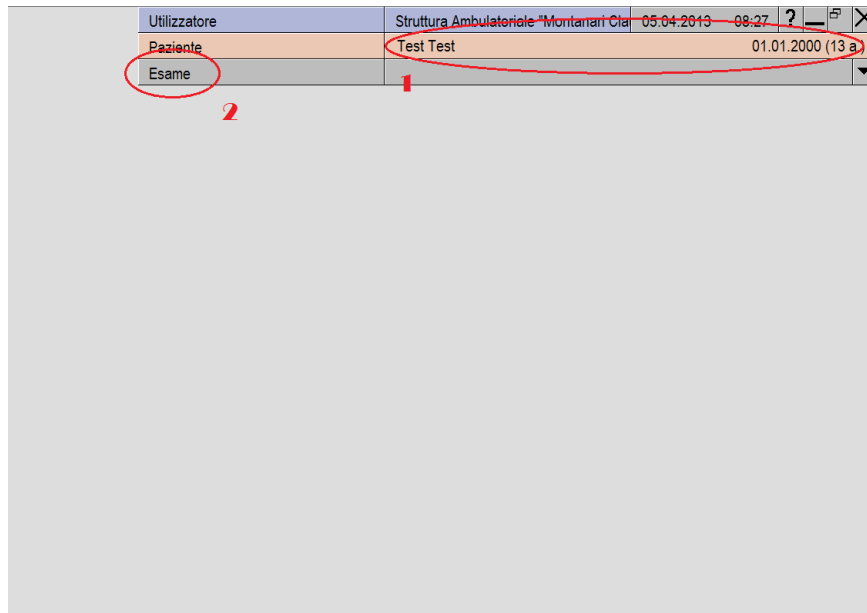

9. Selezionare da elenco pulsanti sulla sinistra “MONITORAGGIO PRESSIONE”.

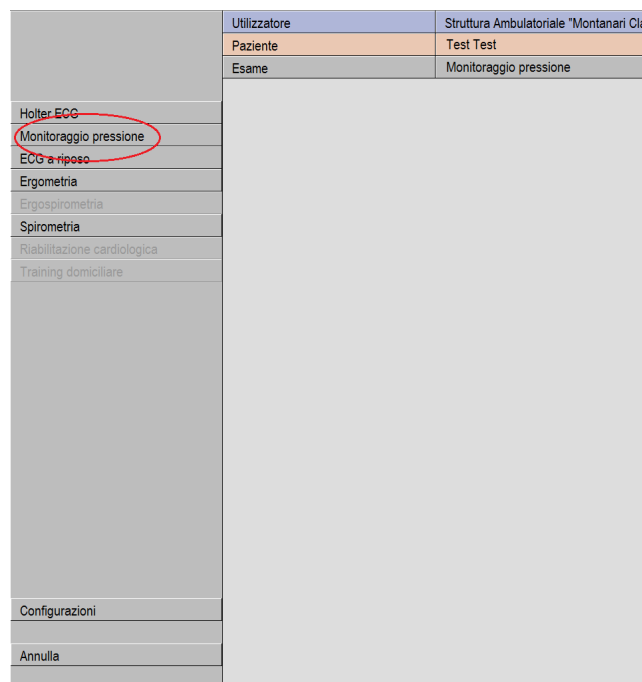


10. Nel menù successivo cliccare sul pulsante “AVVIO DEL REGISTRATORE”

| | | |
|-------------------------------|--------------|--|
| | Utilizzatore | Struttura Ambulatoriale "Montanari Cla |
| | Paziente | Test Test |
| | Esame | Monitoraggio pressione |
| Avvio del registratore | | |
| Letture del registratore | | |
| Mostra esame / referto | | |
| Mostra confronto | | |
| Mostra trend | | |
| Configurazioni | | |
| Annulla | | |

11. Nella schermata che si visualizzerà controllare modello registratore (PUNTO 1); se si desidera cambiare qualche parametro (come ad esempio intervallo registrazioni) cliccare su “CAMBIA” (PUNTO 2).

| | | | |
|----------------------|---------------|--|---|
| custo screen | | Utilizzatore | |
| | | Paziente | |
| | | Esame | |
| Registratore | ▼ | custo screen 100 / 200 | ▲ |
| Parametri di avvio | ▼ | Standard | ▲ |
| Intervallo di misura | | 06:00 - 22:00 ogni 15 min 22:00 - 06:00 ogni 30 min | |
| Ripetizione misure | | nessuna | |
| Opzioni | | Bip prima della misura ON Visualizza misure ON Stampa diario OFF | |
| Avvio | Cambia | Esci | |


12. La schermata si estenderà a destra, da qui selezionare il parametro da modificare (PUNTO1), se vengono effettuate modifiche cliccare su “SALVA” (PUNTO 2).

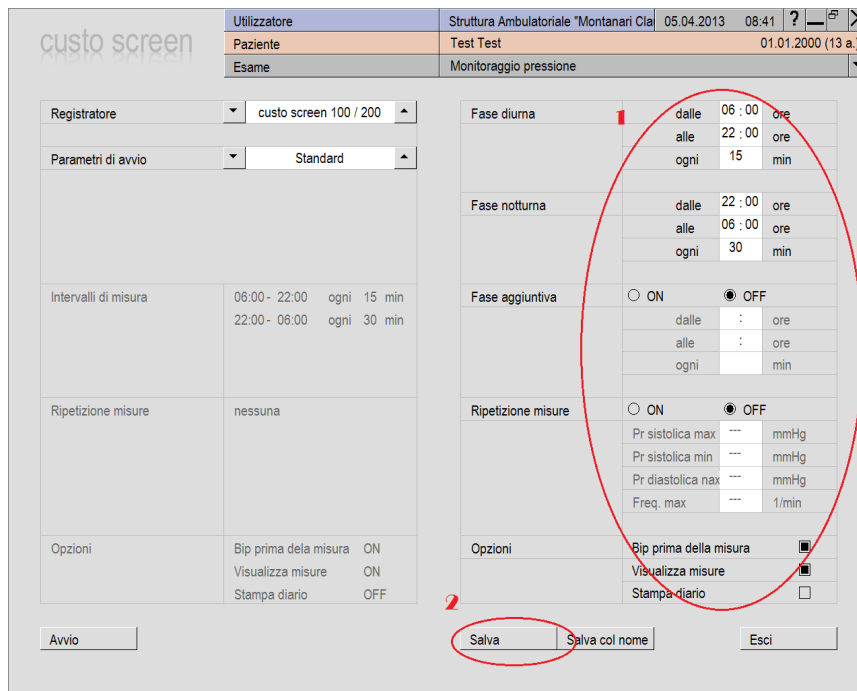

13. Controllare le batterie nel registratore (PUNTO 1) e che questo si accese (PUNTO 2)



14. Cliccare su avvia

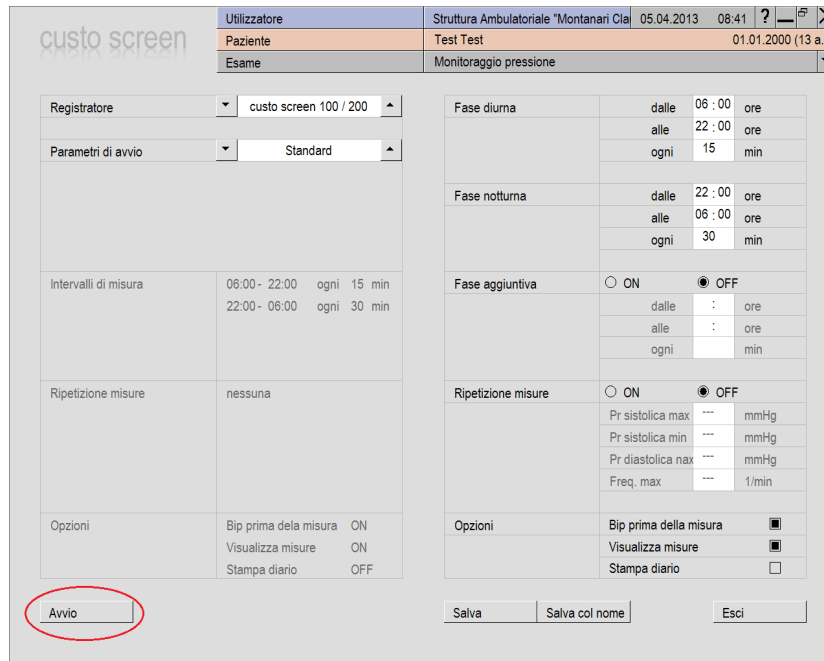


The screenshot shows the 'custo screen' interface for setting up a blood pressure monitoring test. The top bar displays user and patient information: 'Struttura Ambulatoriale *Montanari Clai', '05.04.2013 08:41', 'Paziente: Test Test', and '01.01.2000 (13 a.)'. The test type is 'Monitoraggio pressione'.

Configuration options include:



- Registratore:** custo screen 100 / 200
- Parametri di avvio:** Standard
- Intervalli di misura:** 06:00 - 22:00 ogni 15 min; 22:00 - 06:00 ogni 30 min
- Ripetizione misure:** nessuna
- Opzioni:** Bip prima della misura (ON), Visualizza misure (ON), Stampa diario (OFF)
- Fase diurna:** dalle 06:00 alle 22:00 ore, ogni 15 min
- Fase notturna:** dalle 22:00 alle 06:00 ore, ogni 30 min
- Fase aggiuntiva:** OFF (radio button selected)
- Ripetizione misure:** OFF (radio button selected)
- Opzioni (right):** Bip prima della misura (checkbox checked), Visualizza misure (checkbox checked), Stampa diario (checkbox unchecked)

Buttons at the bottom include 'Avvio' (circled in red), 'Salva', 'Salva col nome', and 'Esci'.

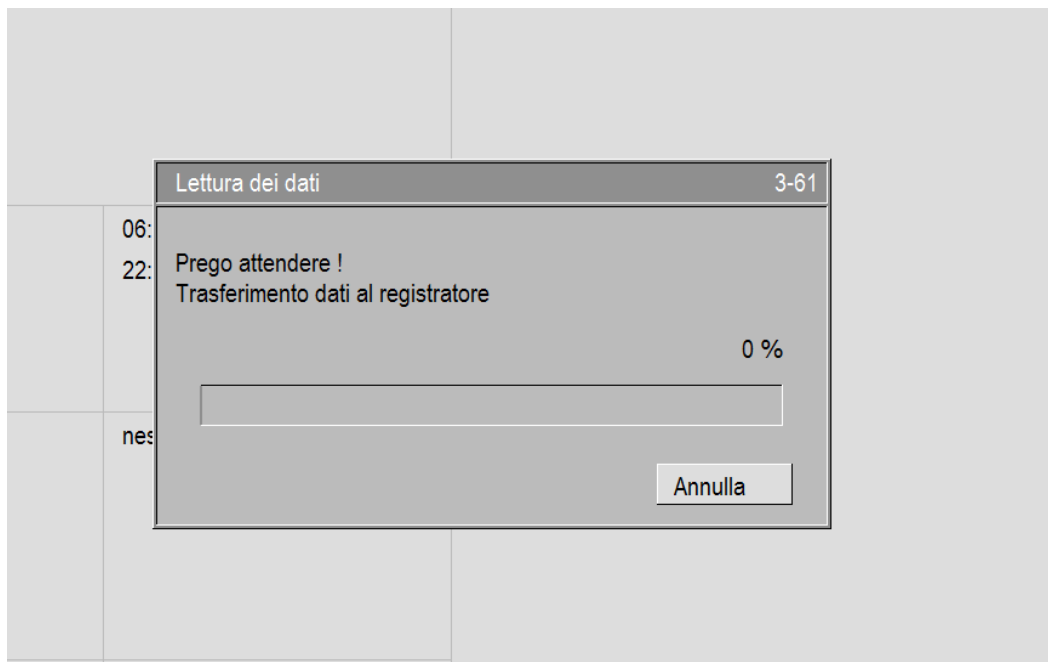
15. Apparirà una barra progresso



The screenshot shows a dialog box titled 'Letture dei dati' with the number '3-61' in the top right corner. The main text reads 'Prego attendere ! Trasferimento dati al registratore'. Below the text is a progress bar showing '0 %'. At the bottom right of the dialog is an 'Annulla' button.

| | | |
|---|----------------|----------------|
|   | P.SM.M.04 | Rev. 01 |
| | ESECUZIONE MAP | del 26/07/2011 |

16. Posizionare il registratore davanti al lettore IR (PUNTO1) e premere pulsante blu accanto al display (PUNTO2) .

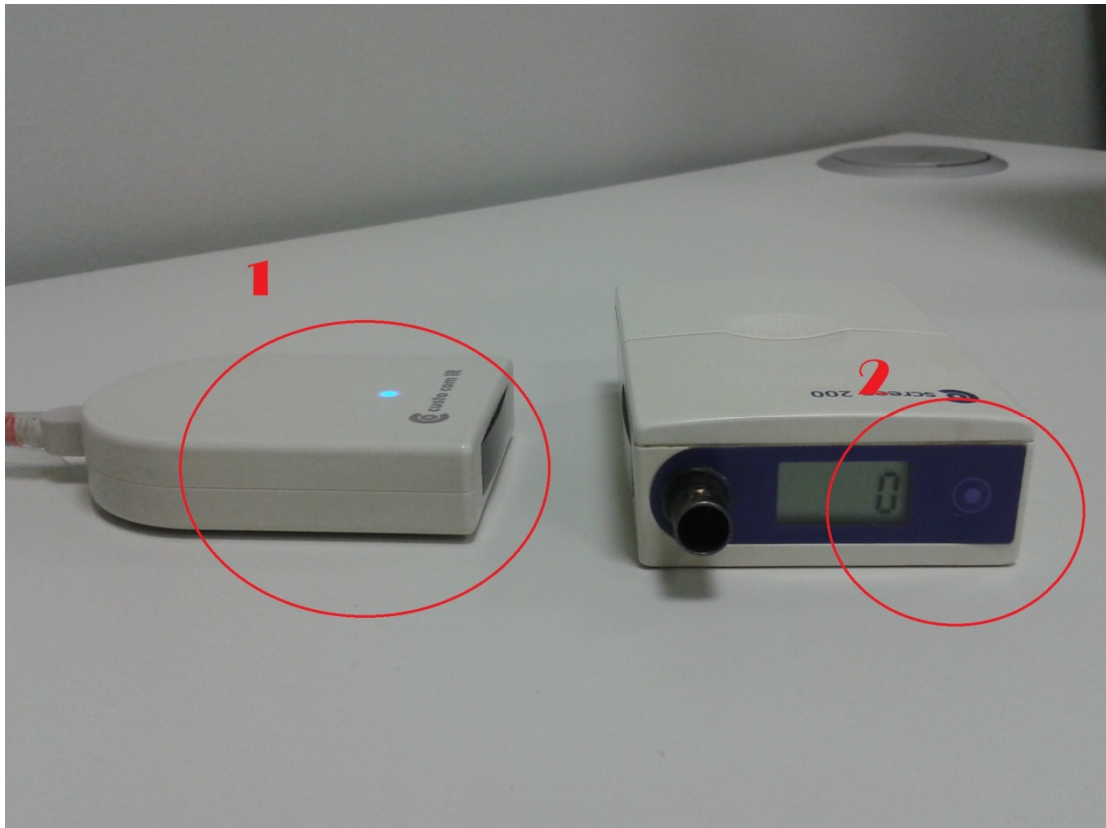

17. Far aspettare il paziente 15 min per verificare che la registrazione parta.