




P.T. 02 BIS

SETTAGGI HOLTER


Rev. 01

del 15/12/2014

1. Cliccare su icona custodiagnostic

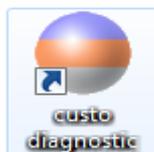

2. Nel menù nella parte superiore dello schermo cliccare su "ESAME"

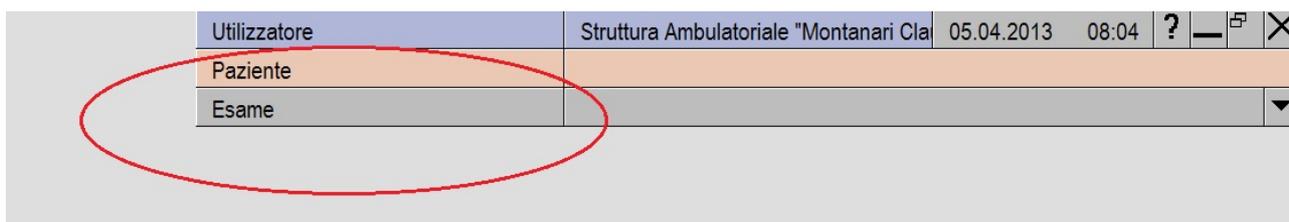

3. Nel menù che appare a sinistra cliccare su "Holter ECG"



4. Nel nuovo menù che appare a sinistra cliccare su "Configurazioni"






5. Nel menù apparso controllare che nel menù a tendina sia selezionato "Holter ECG" (punto 1) e cliccare "stampa" (punto 2).



6. Nel menù apparso sotto selezionare "contenuto" (punto 1), spuntare i campi come nell'immagine sottostante (punto 2) e cliccare su "salva" (punto 3).

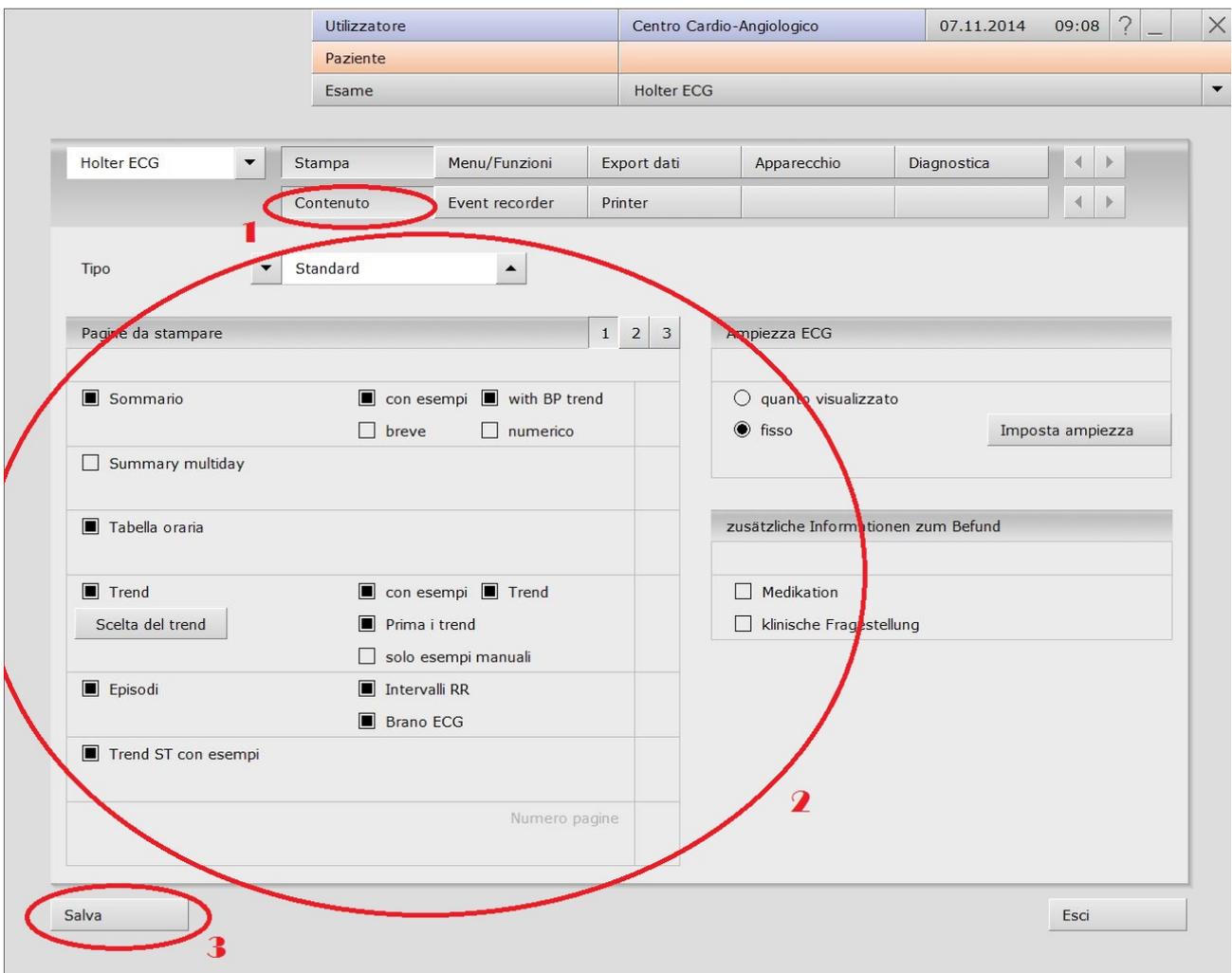




7. Nel menù in alto controllare che nella tendina sia selezionato "Holter ECG" (punto 1) e cliccare su "Menù/Funzioni" (punto 2).



8. Nel menù apparso sotto selezionare "Menù/Funzioni" (punto 1), spuntare i campi come nell'immagine sottostante (punti 2) e cliccare su "salva" (punto 3).

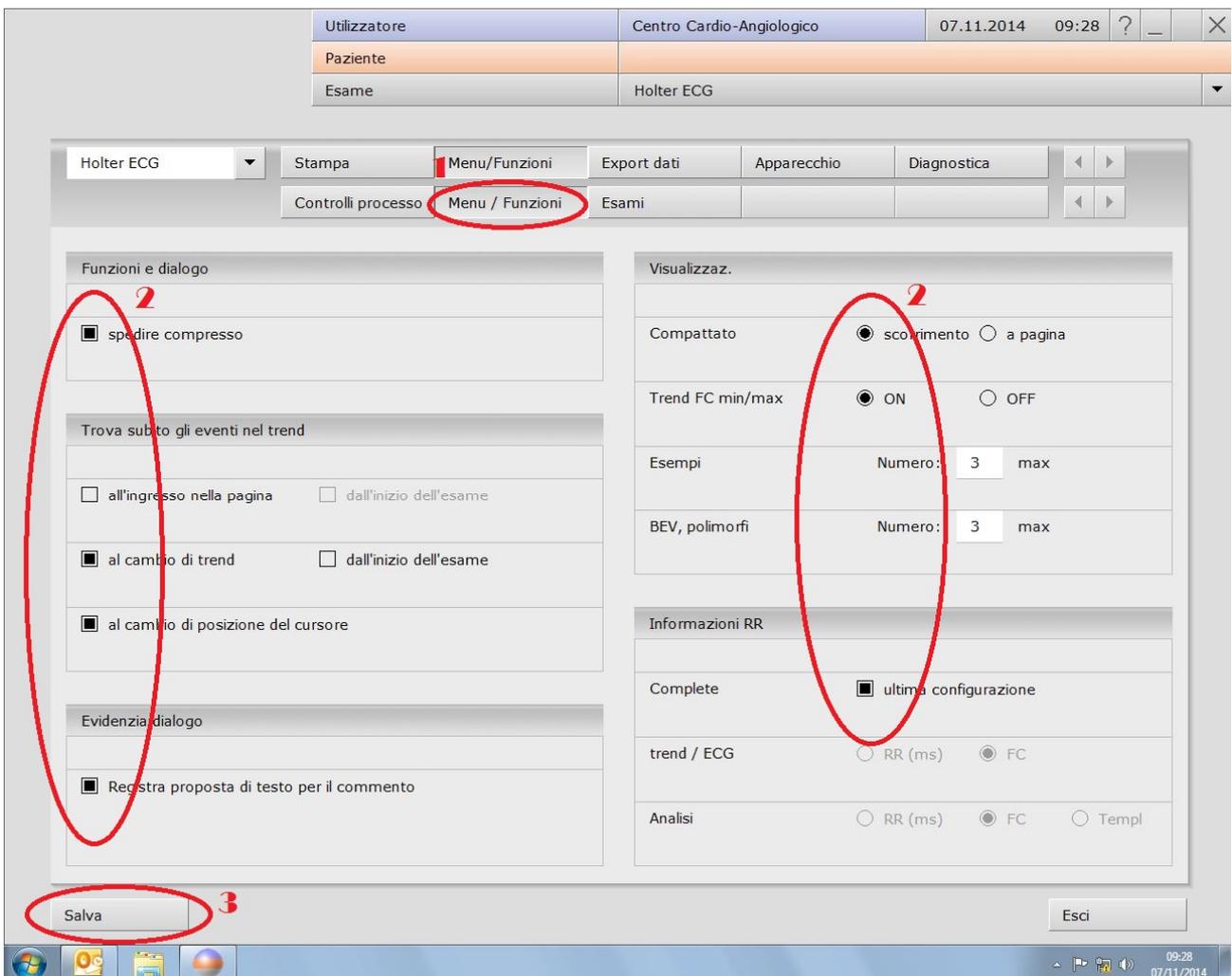




9. Nel menù in alto controllare che nella tendina sia selezionato "Holter ECG" (punto 1) e cliccare su "Diagnostica" (punto 2).




10. Nel menù apparso sotto selezionare "Referto" (punto 1), spuntare i campi come nell'immagine sottostante (punti 2) e cliccare su "salva" (punto 3).

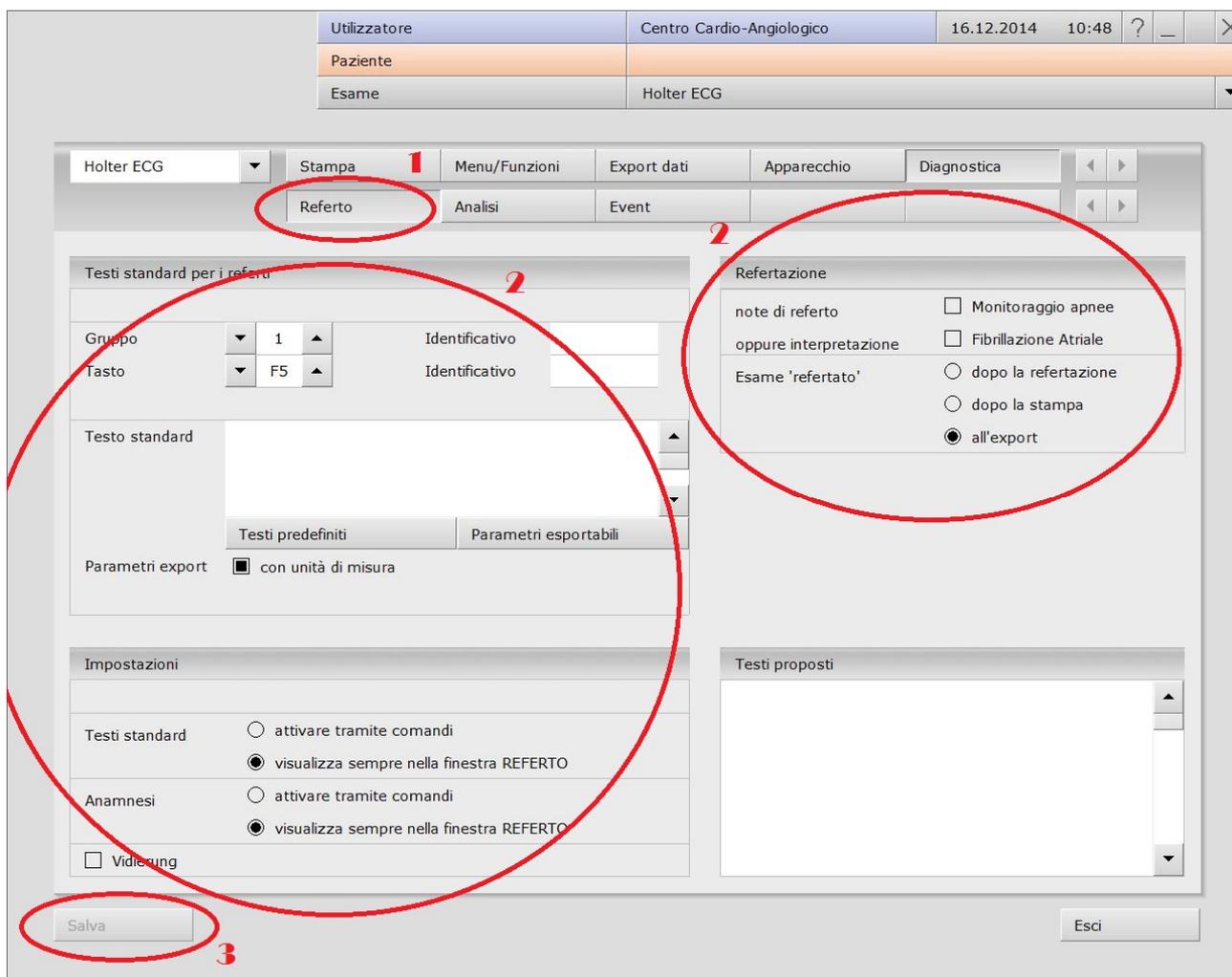




11. Nel menù in alto controllare di aver selezionato "Holter ECG" (punto 1) e "Diagnostica" (punto 2), cliccare "Analisi" (punto 3).

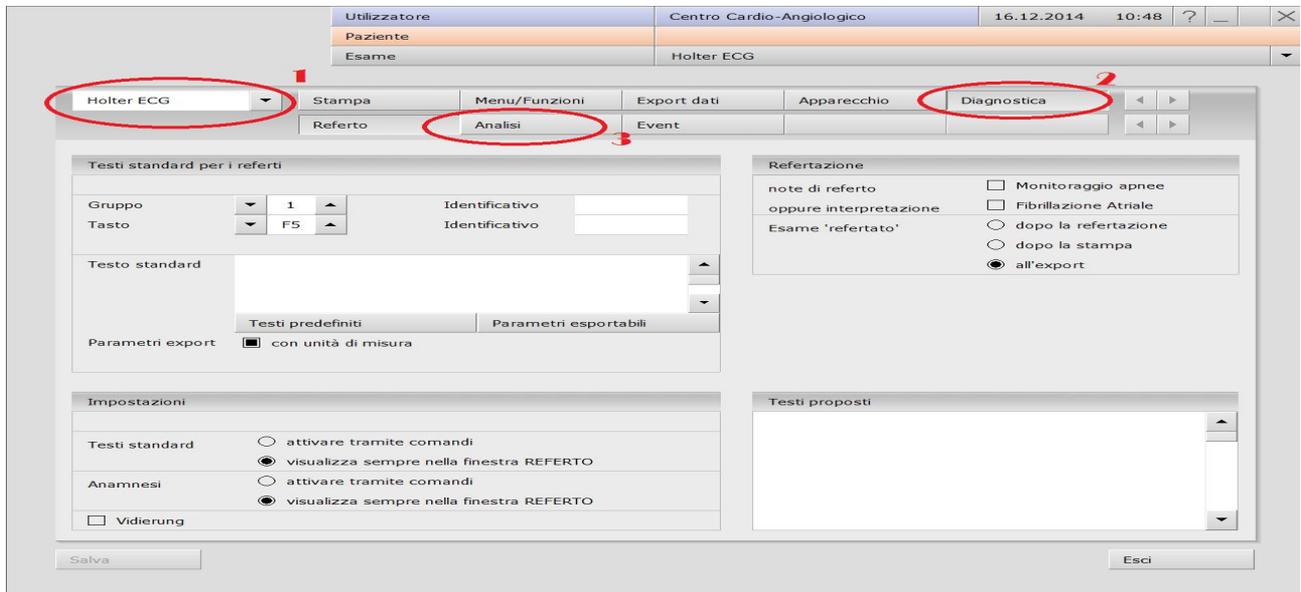

12. Nel menù sottostante cliccare su "Eventi" (punto 1), Selezionare le due schede numero 1 a destra e a sinistra (punti 2), impostare i valori dell'immagine (punti 3) e cliccare "salva" (punto 4).

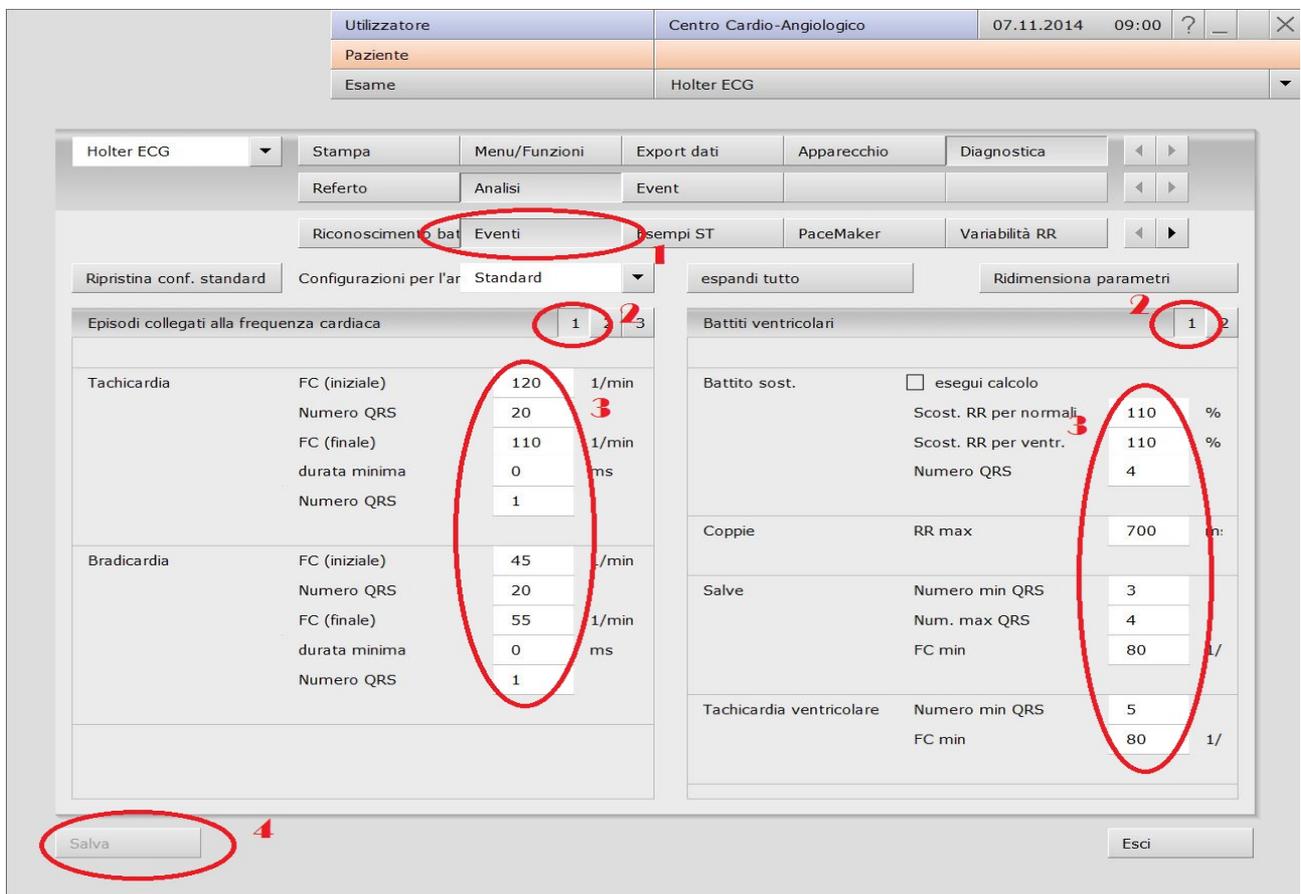



13. Nella stessa schermata selezionare le schede numero 2 a destra e a sinistra (punti 1), impostare i valori dell'immagine (punti 2) e cliccare salva (punto 3).

Episodi collegati alla frequenza cardiaca	Standard	2
Pausa	RR sopravventr.	2.00 secon
	RR ventr.	2.50 secon
	durata massima	60000 ms
QRS perso	Dist. RR normali	180 %
	Dist. RR ventr.	180 %
	Numero QRS(rif)	8
	<input checked="" type="checkbox"/> Esclusione in caso di BEV	
BESV	prematùrità >	25 %
	Numero QRS(rif)	8
	massimo BESV	10000 ms
	ritardo <	120 %

Battiti ventricolari	Standard	2
Bigemini	Rel. (1:1)	5
	durata minima	0 m:
Trigemini	Rel. (2:1)	5
	durata minima	0 m:
BEV pos. fissa	Rel. (>3:1)	5
	durata minima	0 m:


14. Nella stessa schermata selezionare la scheda numero 3 a sinistra (punto 1), impostare i valori come nell'immagine (punto 2) e cliccare salva (punto 3).

Episodi collegati alla frequenza cardiaca	Standard	3
Aritmia	Differenza RR	15 %
	Numero QRS	10
	durata minima	0 ms
TSVP	FC min	110 l/min
	Variazione FC	30 %
	Numero QRS	7
	Quantità per ØRR	8


Battiti ventricolari	Standard	1
Bigemini	Rel. (1:1)	5
	durata minima	0 m:
Trigemini	Rel. (2:1)	5
	durata minima	0 m:
BEV pos. fissa	Rel. (>3:1)	5
	durata minima	0 m:



15. Nel menù in alto controllare di aver selezionato "Holter ECG", "Diagnostica", "Analisi" (Punti 1) e cliccare su "PaceMaker" (punto 2)

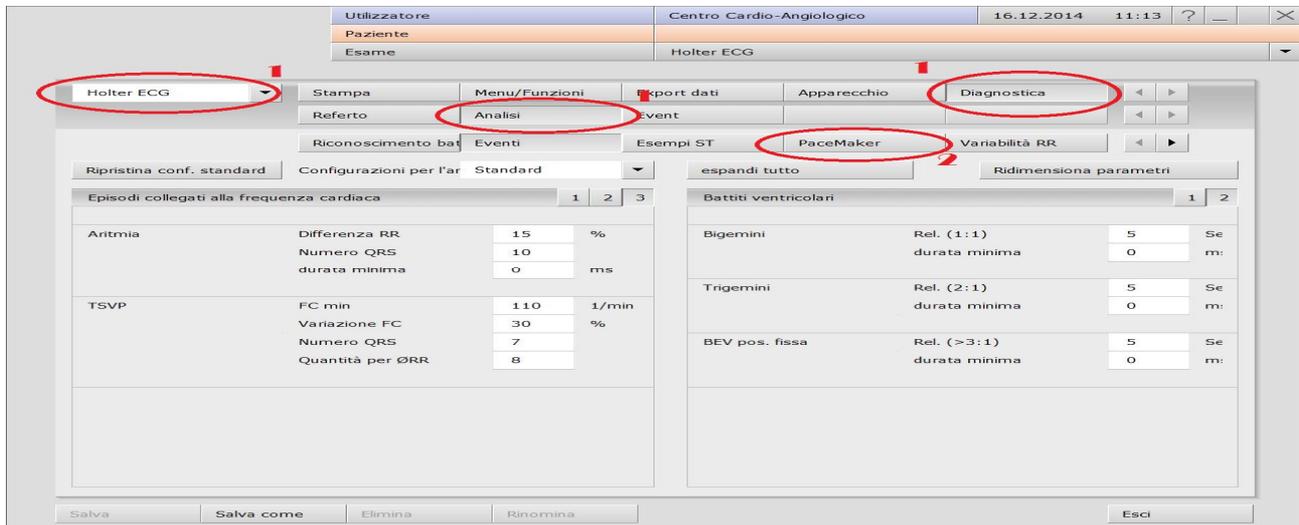

16. Impostare i valori come nell'immagine (punti 1) e cliccare "salva" (punto 2).

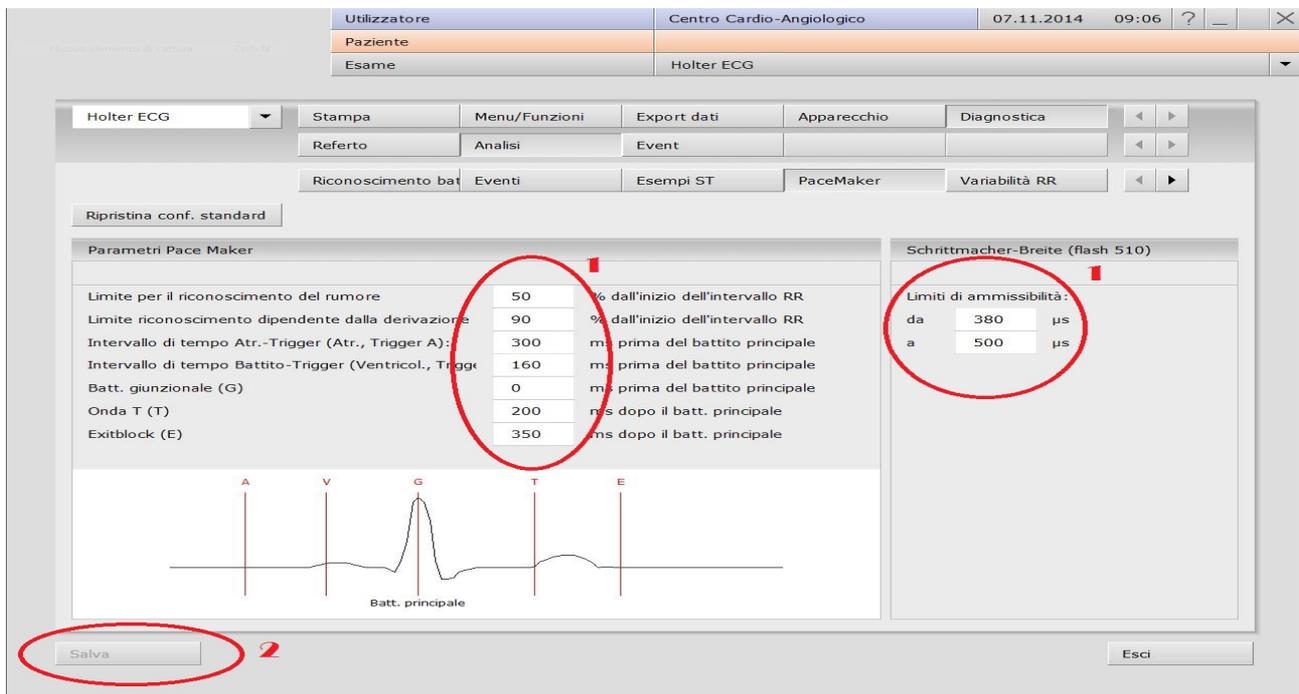

17. Chiudere il programma.

FINE



P.T. 02 BIS

Rev. 01

SETTAGGI HOLTER

del 15/12/2014