




1. Cliccare su icona custodiagnostic

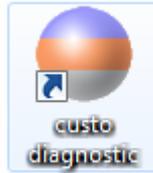


2. Nel menù nella parte superiore dello schermo cliccare su “PAZIENTE”

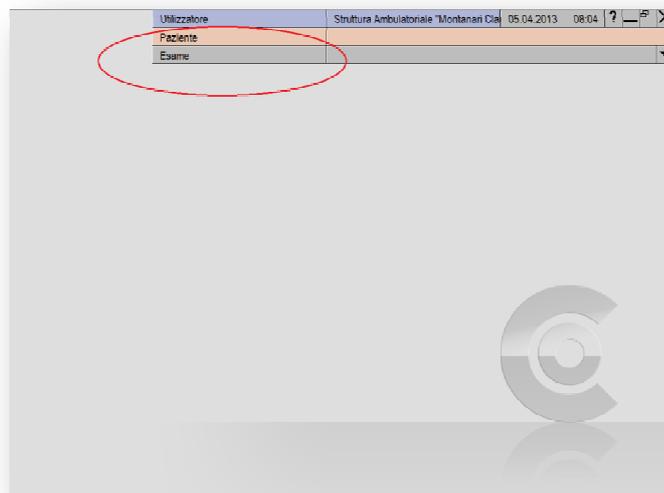

3. Si aprirà un elenco di pulsanti sul lato sinistro della videata; da qui selezionare “CERCA PAZIENTE”

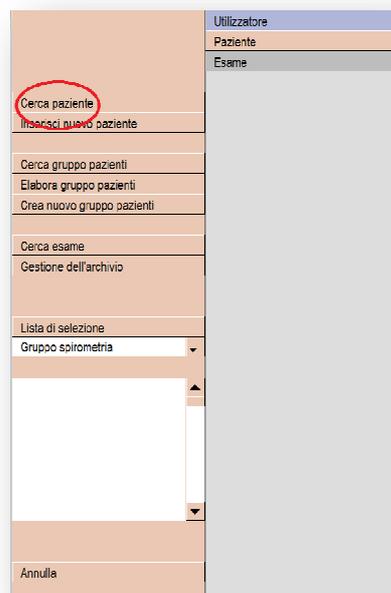

4. Quando si caricherà la maschera di ricerca immettere cognome e nome negli appositi campi (PUNTO 1) per iniziare la ricerca. Nella parte inferiore comparirà una lista di nomi (PUNTO 2) , da questa selezionare il paziente desiderato con doppio clic o cliccando sul tasto “SELEZIONA PAZIENTE” (PUNTO 3).

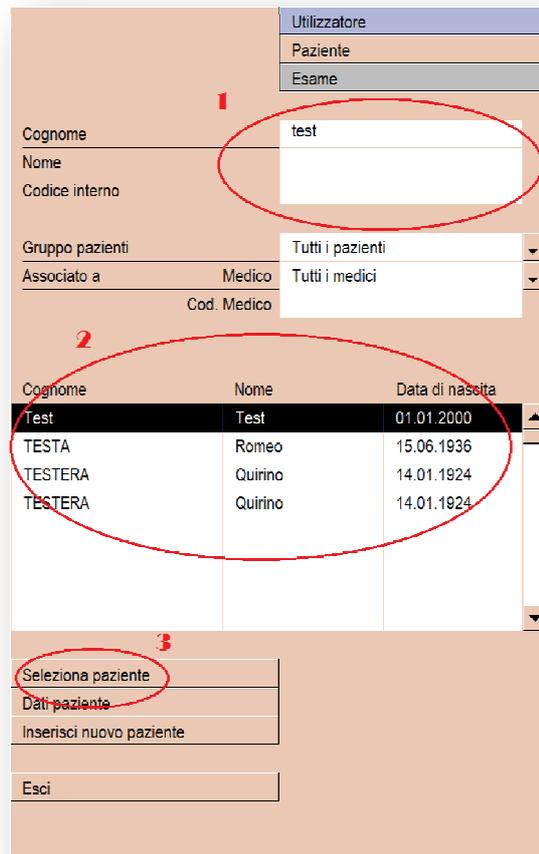


Utilizzatore		
Paziente		
Esame		
Cognome	test	
Nome		
Codice interno		
Gruppo pazienti	Tutti i pazienti	
Associato a	Medico	Tutti i medici
Cod. Medico		
Cognome	Nome	Data di nascita
Test	Test	01.01.2000
TESTA	Romeo	15.06.1936
TESTERA	Quirino	14.01.1924
TESTERA	Quirino	14.01.1924
Seleziona paziente		
Dati paziente		
Inserisci nuovo paziente		
Esci		

5. Il nome del paziente apparirà nel menù superiore.



Utilizzatore	Struttura Ambulatoriale Montanari Cl	05/04/2013 08:25
Paziente	Test Test	01.01.2000 (13)
Esame		


6. Nel caso che il paziente non sia presente cliccare su “INSERISCI NUOVO PAZIENTE”

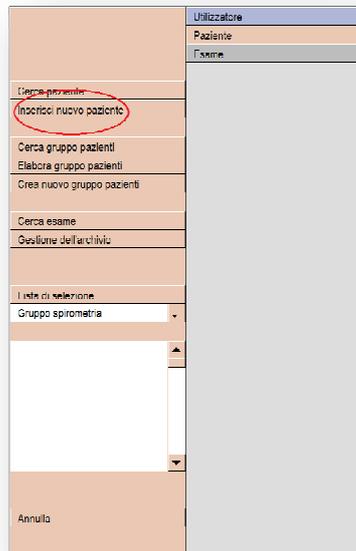

The screenshot shows a software menu with the following items:

- Utilizzatore
- Paziente
- Esame
- Cerca paziente
- Inserisci nuovo paziente** (circled in red)
- Cerca gruppo pazienti
- Elabora gruppo pazienti
- Crea nuovo gruppo pazienti
- Cerca esame
- Gestione dell'archivio
- Lista di selezione
- Gruppo spirometria
- Annula


7. si aprirà la maschera anagrafica da compilare con i campi obbligatori che sono nome, cognome, data di nascita (PUNTO 1). Nel caso ci sia una terapia da inserire compilare anche il campo “NOTE” (PUNTO 2) quindi cliccare su pulsante “SALVA” (PUNTO 3).

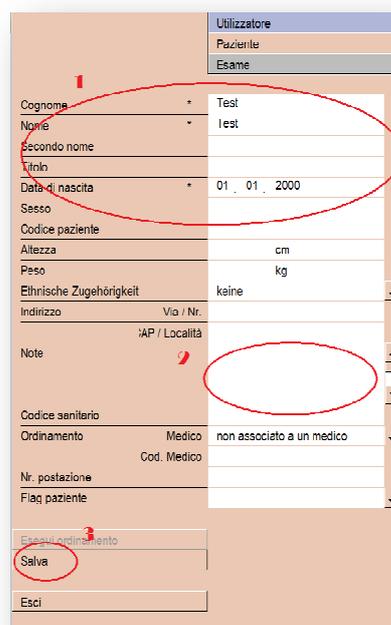


The screenshot shows a patient registration form with the following fields:

- Utilizzatore
- Paziente
- Esame
- Cognome * Test
- Nome * Test
- Secondo nome
- Titolo
- Data di nascita * 01 / 01 / 2000
- Sesso
- Codice paziente
- Altezza cm
- Peso kg
- Ethnische Zugehörigkeit keine
- Indirizzo Via / Nr.
- Indirizzo :AP / Località
- Note
- Codice sanitario
- Ordinamento Medico non associato a un medico
- Cod. Medico
- Nr. postazione
- Flag paziente
- Esegui ordinamento
- Salva** (circled in red)
- Esci


8. I dati del paziente si visualizzeranno nel menù superiore (PUNTO 1) e da qui cliccare su “ESAME” (PUNTO 2).

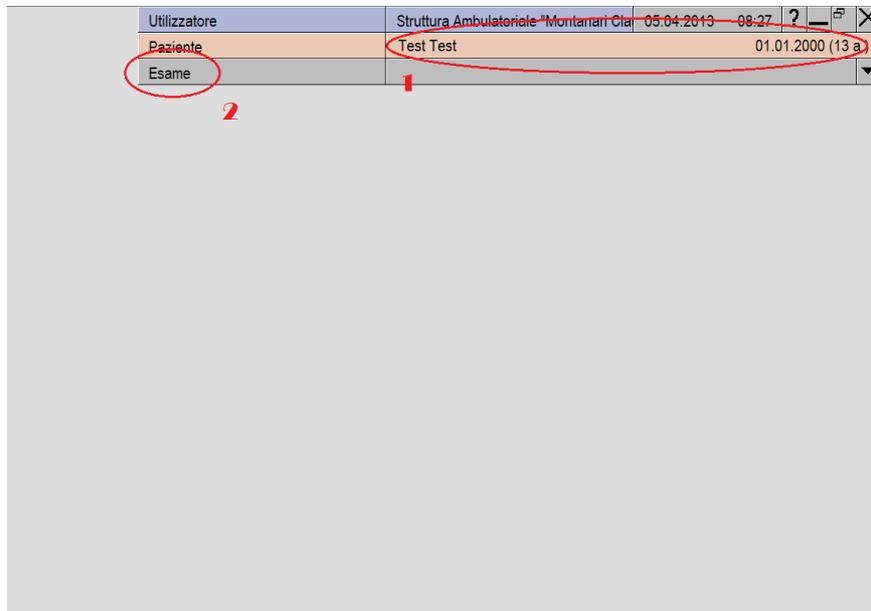


9. Selezionare da elenco pulsanti sulla sinistra “HOLTER ECG”.

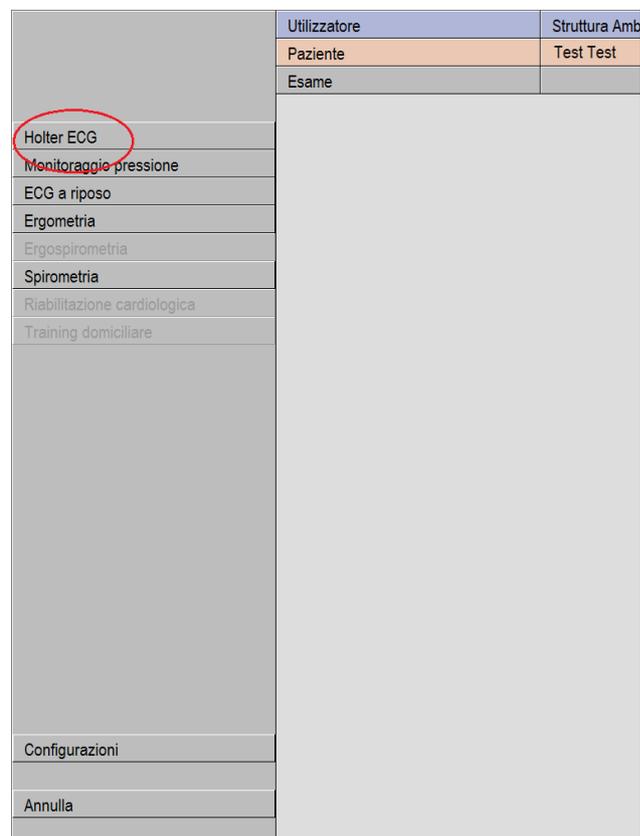

12. La schermata si estenderà sulla destra e qui selezionare il parametro da modificare (PUNTO1), se ci sono modifiche cliccare su salva (PUNTO 2).

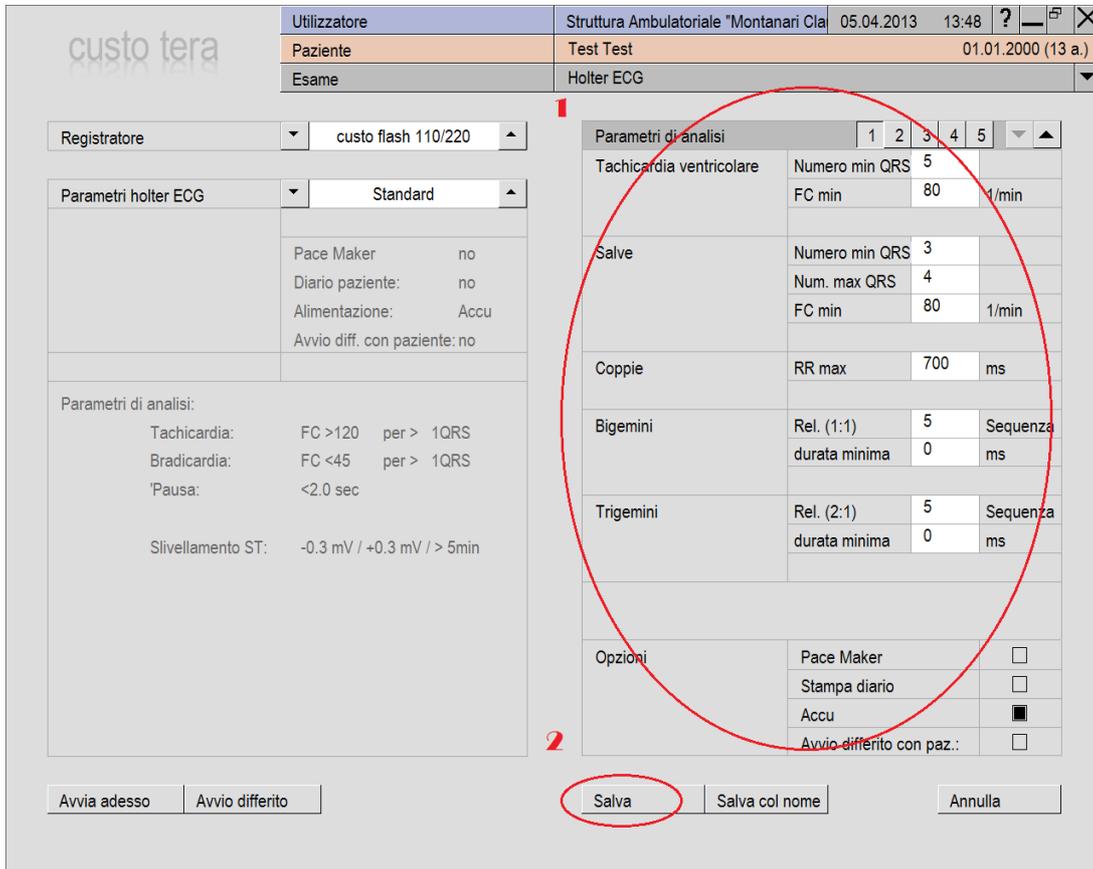

13. Controllare le batterie nel registratore (PUNTO 1) e che questo si acceso (PUNTO 2)

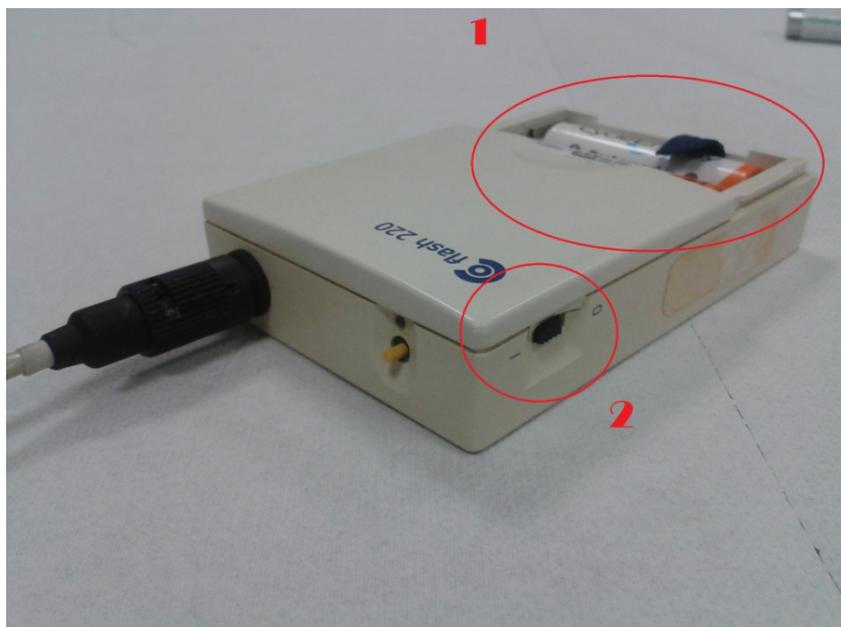

14. Inserire la card nel registratore




15. Cliccare su avvia adesso

Utilizzatore: Struttura Ambulatoriale "Montanari Clai" 05.04.2013 14:09 ?	
Paziente: Test Test 01.01.2000 (13 a.)	
Esame: Holter ECG	

Registratore: custo flash 110/220	Parametri di analisi:																																								
Parametri holter ECG: Standard	<table border="1"> <tr> <td>Tachicardia ventricolare</td> <td>Numero min QRS</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>FC min</td> <td>80</td> <td>1/min</td> </tr> <tr> <td>Salve</td> <td>Numero min QRS</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Num. max QRS</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>FC min</td> <td>80</td> <td>1/min</td> </tr> <tr> <td>Coppie</td> <td>RR max</td> <td>700</td> <td>ms</td> </tr> <tr> <td>Bigemini</td> <td>Rel. (1:1)</td> <td>5</td> <td>Sequenza</td> </tr> <tr> <td></td> <td>durata minima</td> <td>0</td> <td>ms</td> </tr> <tr> <td>Trigemini</td> <td>Rel. (2:1)</td> <td>5</td> <td>Sequenza</td> </tr> <tr> <td></td> <td>durata minima</td> <td>0</td> <td>ms</td> </tr> </table>	Tachicardia ventricolare	Numero min QRS	5			FC min	80	1/min	Salve	Numero min QRS	3			Num. max QRS	4			FC min	80	1/min	Coppie	RR max	700	ms	Bigemini	Rel. (1:1)	5	Sequenza		durata minima	0	ms	Trigemini	Rel. (2:1)	5	Sequenza		durata minima	0	ms
Tachicardia ventricolare	Numero min QRS	5																																							
	FC min	80	1/min																																						
Salve	Numero min QRS	3																																							
	Num. max QRS	4																																							
	FC min	80	1/min																																						
Coppie	RR max	700	ms																																						
Bigemini	Rel. (1:1)	5	Sequenza																																						
	durata minima	0	ms																																						
Trigemini	Rel. (2:1)	5	Sequenza																																						
	durata minima	0	ms																																						
Pace Maker: no Diario paziente: no Alimentazione: Accu Avvio diff. con paziente: no	Opzioni:																																								
Parametri di analisi: Tachicardia: FC >120 per > 1QRS Bradicardia: FC <45 per > 1QRS 'Pausa: <2.0 sec Slivellamento ST: -0.3 mV / +0.3 mV / > 5min	Pace Maker: <input type="checkbox"/> Stampa diario: <input type="checkbox"/> Accu: <input checked="" type="checkbox"/> Avvio differito con paz.: <input type="checkbox"/>																																								

<input checked="" type="button" value="Avvia adesso"/> <input type="button" value="Avvio differito"/>	<input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Salva col nome"/> <input type="button" value="Annulla"/>
---	---

16. si aprirà una lista dei registratori disponibili da cui si dovrà selezionare il registratore corretto dalla lista (PUNTO 1), successivamente cliccare su "CONFERMA" (PUNTO 2)

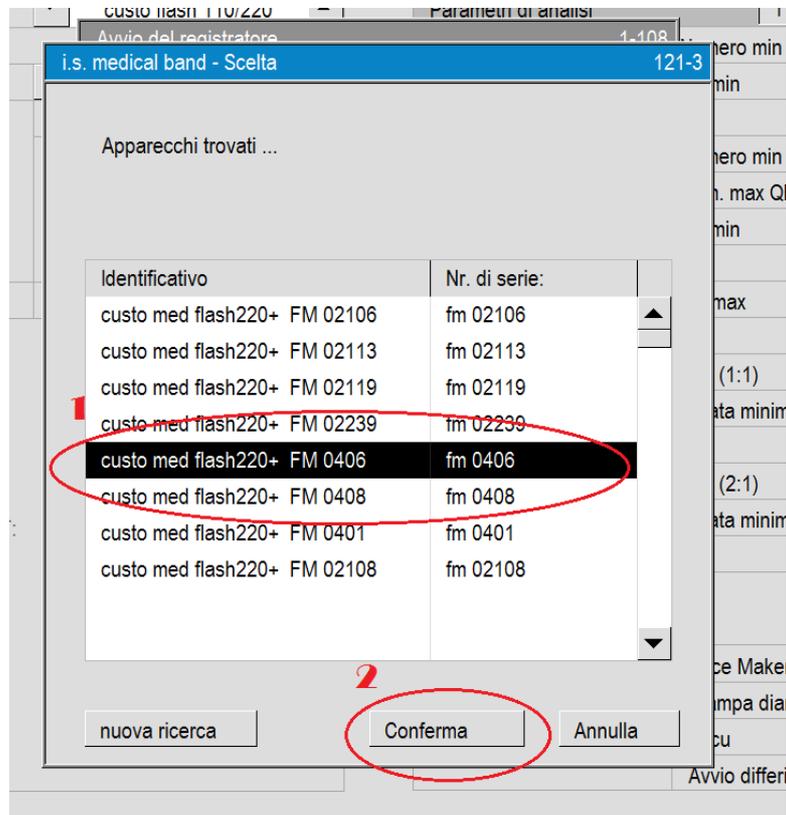

17. Controllare la traccia (PUNTO 1) e cliccare su "ESCI" (PUNTO 2)

