



1. Cliccare su icona custodiagnostic




2. Nel menù nella parte superiore dello schermo cliccare su “PAZIENTE”

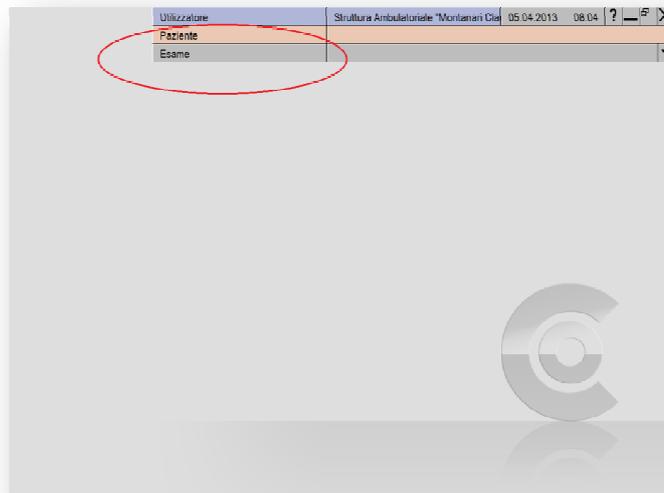

3. Si aprirà un elenco di pulsanti sul lato sinistro della videata; da qui selezionare “CERCA PAZIENTE”

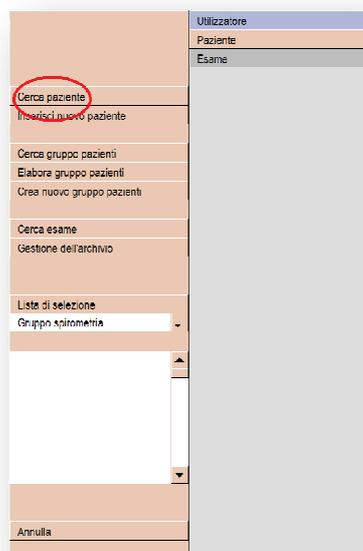


4. Quando si caricherà la maschera di ricerca immettere cognome e nome negli appositi campi (PUNTO 1) per iniziare la ricerca. Nella parte inferiore comparirà una lista di nomi (PUNTO 2) , da questa selezionare il paziente desiderato con doppio clic o cliccando sul tasto “SELEZIONA PAZIENTE” (PUNTO 3).

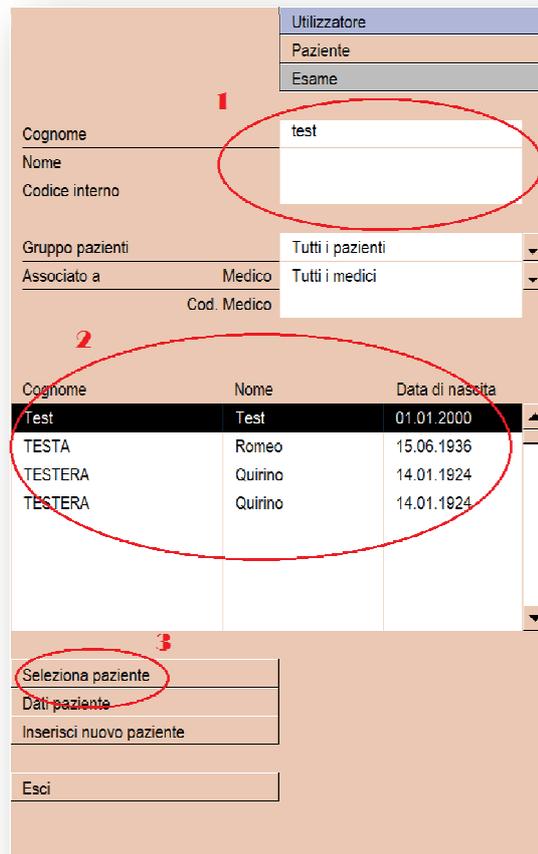


Utilizzatore		
Paziente		
Esame		
Cognome	test	
Nome		
Codice interno		
Gruppo pazienti	Tutti i pazienti	
Associato a	Medico	Tutti i medici
Cod. Medico		
Cognome	Nome	Data di nascita
Test	Test	01.01.2000
TESTA	Romeo	15.06.1936
TESTERA	Quirino	14.01.1924
TESTERA	Quirino	14.01.1924
Seleziona paziente		
Dati paziente		
Inserisci nuovo paziente		
Esci		

5. Il nome del paziente apparirà nel menù superiore.

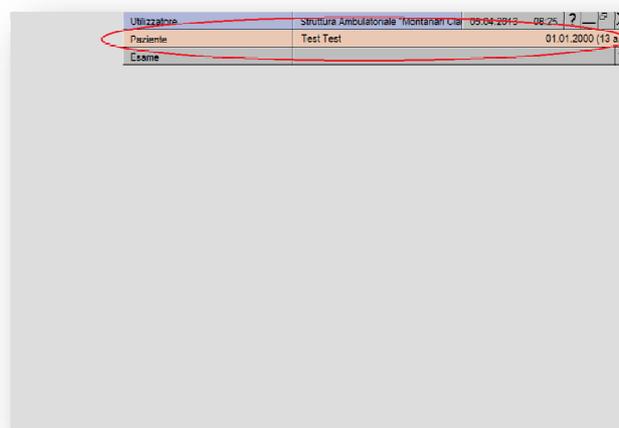


Utilizzatore	Struttura Ambulatoriale Montanari Cl	05-04-2013 08:25
Paziente	Test Test	01.01.2000 (13)
Esame		

6. Nel caso che il paziente non sia presente cliccare su “INSERISCI NUOVO PAZIENTE”

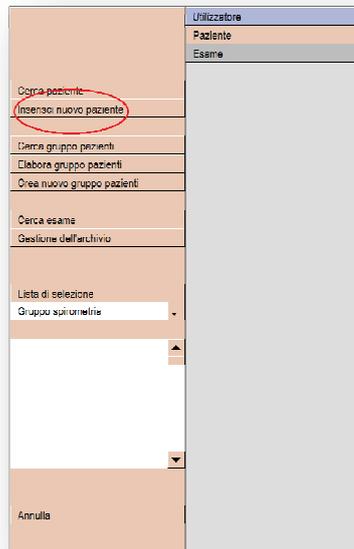

The screenshot shows a software menu with the following items: Utilizzatore, Paziente, Esame, Cerca paziente, **Inserisci nuovo paziente** (circled in red), Cerca gruppo pazienti, Crea gruppo pazienti, Crea nuovo gruppo pazienti, Cerca esame, Gestione dell'archivio, Lista di selezione, Gruppo spirometria, and Annulla.


7. si aprirà la maschera anagrafica da compilare con i campi obbligatori che sono nome, cognome, data di nascita (PUNTO 1). Nel caso ci sia una terapia da inserire compilare anche il campo “NOTE” (PUNTO 2) quindi cliccare su pulsante “SALVA” (PUNTO 3).

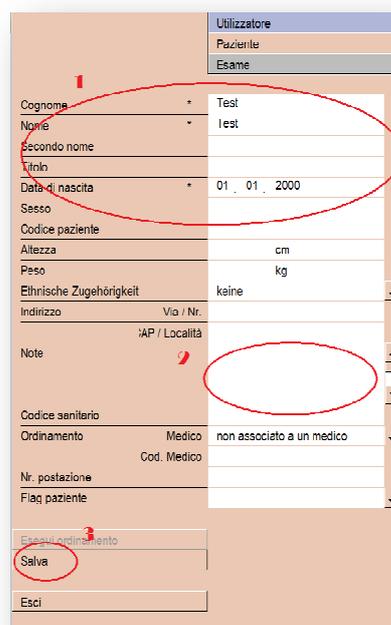


The screenshot shows a patient registration form with the following fields: Cognome (Test), Nome (Test), Secondo nome, Titolo, Data di nascita (01.01.2000), Sesso, Codice paziente, Altezza (cm), Peso (kg), Etnische Zugehörigkeit (keine), Indirizzo (Via / Nr.), Note, Codice sanitario, Ordinamento (Medico, non associato a un medico), Nr. postazione, and Flag paziente. The 'Salva' button is circled in red.

 	P.SM.M.06	Rev. 01
	ESECUZIONE ECG	del 26/07/2011


8. I dati del paziente si visualizzeranno nel menù superiore (PUNTO 1) e da qui cliccare su “ESAME” (PUNTO 2).

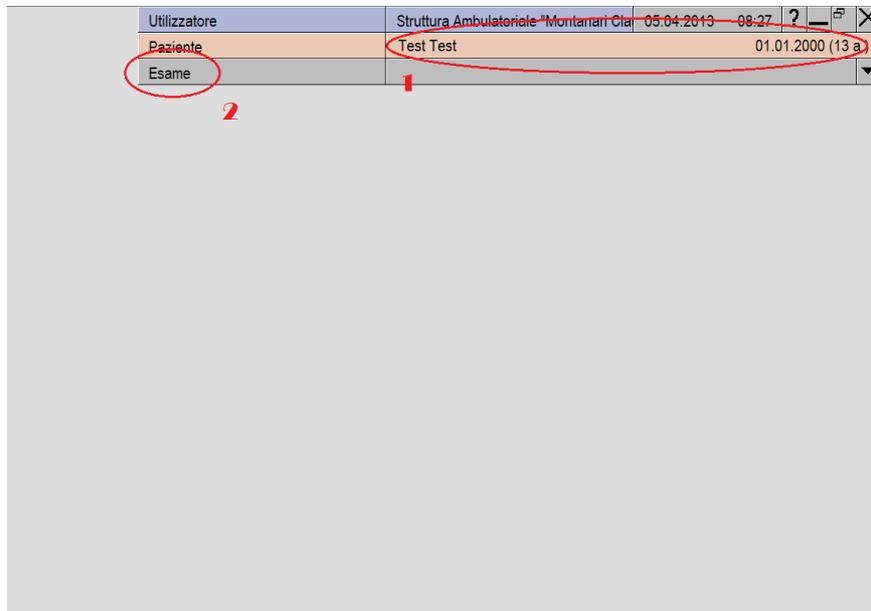


9. Selezionare da elenco pulsanti sulla sinistra “ECG A RIPOSO”.

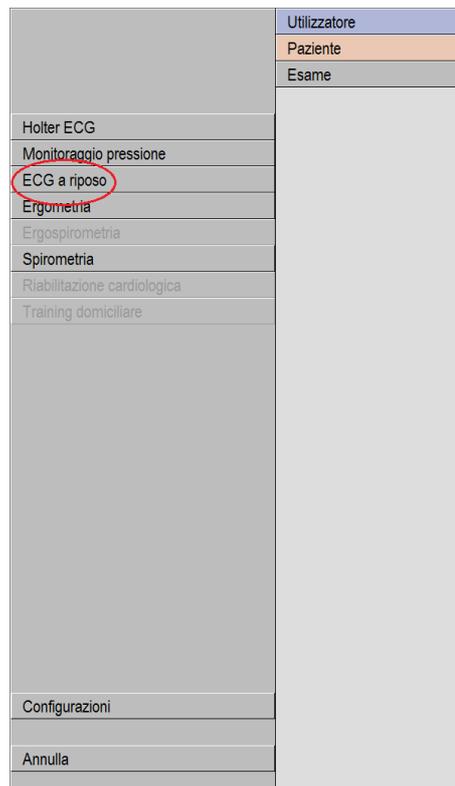

10. Collegare gli elettrodi al paziente e cliccare sul pulsante "ESEGUI ECG"

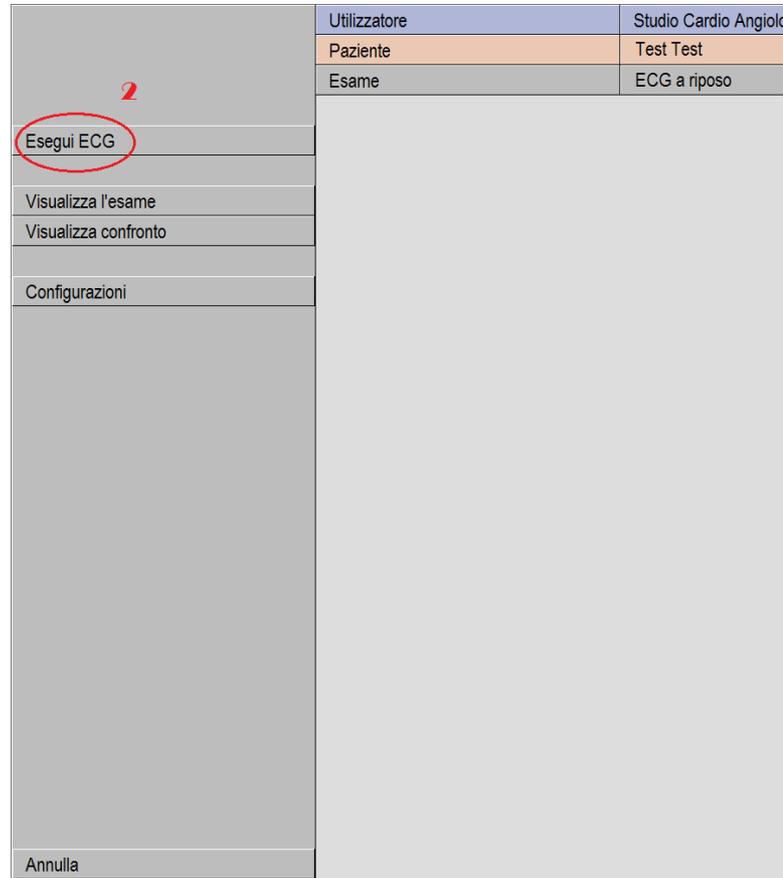

11. Comparirà la schermata con il tracciato, Controllare collegamento di tutti gli elettrodi. Verificare il contatto elettrodi schiacciando il tasto elettrodi nella barra inferiore (PUNTO1). Si aprirà una finestra in cui le barre relative ai vari elettrodi devono essere almeno marroni (PUNTO 2) dopo di che dare "CONFERMA" (PUNTO 3).

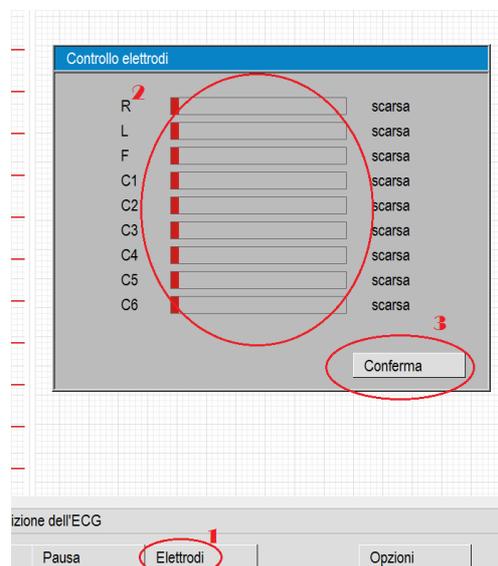



MONTANARI CLAUDIO
struttura ambulatoriale
gruppo M&M servizi medicali

P.SM.M.06

ESECUZIONE ECG

Rev. 01

del 26/07/2011

12. Ritornati al tracciato cliccare su auto start ed attendere 10 secondi e l'esame verrà svolto in automatico.

